

PolyMem®

Obloga za rane - polimerna membrana

Navodilo za uporabo. Obloga in embalaža ne vsebujeta lateksa. Obloge ne uporabljajte ponovno. Ponovna uporaba lahko povzroči kontaminacijo.

NAVODILA ZA UPORABO

NAMEŠČANJE OBLOGE

1. **PRVA NAMESTITEV OBLOGE PolyMem:** Pripravite rano po protokolu oz. po navodilu zdravnika.
2. Izberite oblogo, ki je od 0,6 cm do 5 cm večja od rane.
3. Oblogo namestite na rano tako, da je potiskana stran na zunanji strani. Za pričvrstitev obloge na okolno kožo, lahko preko obloge namestite fiksacijski trak .
4. V prvih dneh po namestitvi obloge boste morda opazili **močnejši** izcedek iz rane. To ni nič nenavadnega in pomeni, da obloga PolyMem deluje.
NAMIG: Za lažjo odločitev kdaj menjati oblogo, na zunanjo stran obloge zarišite obris rane.
5. Obloga mora ostati suha in na rani tudi med umivanjem. Če se zmoči, jo zamenjajte.
6. Med uporabo obloge PolyMem ni priporočljivo vzporedno lokalno zdravljenje rane.

MENJAVA OBLOGE

1. Oblogo PolyMem zamenjajte tik preden tekočina, vidna kot madež skozi film obloge, doseže robove rane. Če tekočina doseže rob obloge, jo morate takoj zamenjati. Pri ranah, ki ne izločajo veliko in pri sicer zdravih uporabnikih, lahko obloga ostane na rani največ sedem dni. Kot velja tudi za druge obloge, priporočamo pogostejše menjave pri bolnikih z oslABLJENIM imunskim sistemom, sladkorno boleznijo ali ko je rana okužena.

2. Oblogo menjajte nežno, da ne poškodujete rane. Obloga se z rano ne sprime, njeno odstranjevanje navadno ne povzroča bolečine.
3. **Ne posegajte v rano, ne čistite je** in ne izpirajte s fiziološko raztopino ali vodo razen v primeru okužbe ali kontaminacije. Obloga PolyMem vsebuje snov, ki rano čisti in v njej ne pušča ostankov. Dodatno čiščenje bi lahko le poškodovalo novonastalo tkivo in podaljšalo čas zdravljenja. Okolico rane lahko očistite, vendar pazite, da ne poškodujete novo-nastalega tkiva v rani.
4. Namestite novo oblogo PolyMem.

Obloge iz družine PolyMem lajšajo bolečino.


Obloge PolyMem so primerne za uporabo ob prisotnih znakih okužbe, če je že uvedeno ustrezno zdravljenje okužbe.

SHRANJEVANJE: Hranite na suhem mestu, pri sobni temperaturi in vlažnosti.

- raztrganine kože • diabetičnega ulkusa • dermatološke okvare • opekline 1. in 2. stopnje • kirurške rane

KONTRAINDIKACIJE


Obloge niso primerne za uporabo s hipokloritno raztopino (belilo).

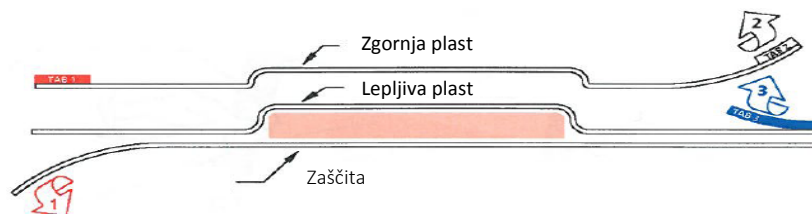


Priprava

- A. Koža ljudi se razlikuje! Nekatera lepilo dobro prenaša, druga je občutljivejša in zahtevnejša, zato je priprava za nekatere ljudi še toliko bolj pomembna.
- B. V vseh primerih pa je pomembno, da je koža okoli rane čista in suha. Uporaba zaščitnih sredstev pripomore k boljši pritrditvi obloge in olajša njeno odstranjevanje. Vlažilni izdelki, losjoni, mazila ali kreme vplivajo na lepljivost, zato naj se jih ne uporablja.
- C. Oblogo vzemite iz ovojnine.

1 Povlecite RDEČI zavihek TAB 1

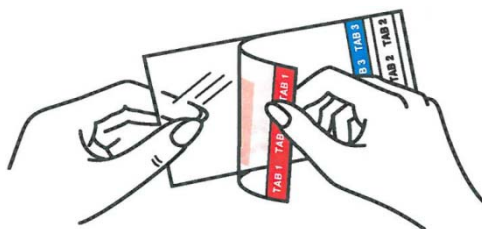


- A. Previdno privzdignite rdeči zavihek označen z napisom TAB 1. Film z oblogo odlepate od spodnje zaščite za oblič. Zaščito zavrzite.
- B. Oblogo namestite na rano.

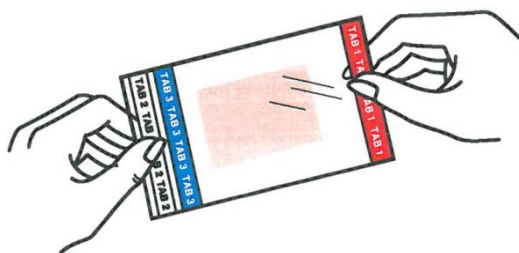

- A. Rahlo pogladite samolepljivi film od sredine proti robu. Ob tem se težko izognete pojavu gubic, ki pa na uporabo in delovanje obloge nimajo vpliva. Filma še ne pričvrstite povsem.


2 Povlecite BEL zavihek TAB 2

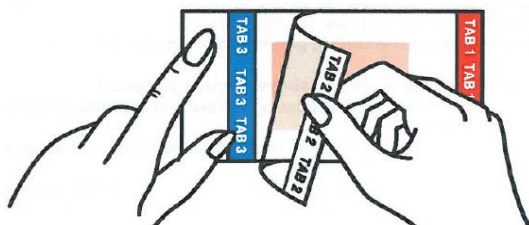

- A. Previdno privzdignite beli zavihek označen z napisom TAB 2. Pod njim je modri zavihek TAB 3.
- B. Z eno roko držite modri TAB 3, z drugo pa odlepate TAB 2 v smeri proti sredini obloge in vzporedno s telesom (ne vlecite ga navpično navzgor). Odstranite roko z modrega TAB 3, da lahko med odstranjevanjem zaščite, samolepljivi film rahlo držite in ga nežno gladite.
- C. Filma še vedno ne pričvrstite na kožo.

- D. TAB 2 odstranjujte zelo počasi; raje 10 sekund kot 1 sekundo!!!
- E. TAB 2 popolnoma odstranite; nazadnje se z njim odlepi še rdeči TAB 1. Z eno roko ves čas varujte nameščeno podlogo in film. Zavržite zaščito.

3 Odstranite MODER zavihek TAB 3

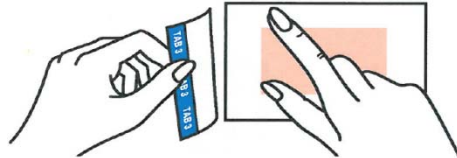

- A. Medtem, ko z eno roko držite nameščeno oblogo, previdno privzdignite TAB 3 (ne modri film). Odlepите ga v smeri proti robu in ga zavržite.
- B. Poravnajte film od sredine proti robovom. Pritisnite na film, posebej na (morebitne) gubice, da zagotovite dobro tesnjenje in adhezijo na kožo.